





CODE codice	DESCRIPTION descrizione	COLOUR colore	SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezion.
15520	Sterile needles with safety device 20G 1½" (Ø 0,9 x 38 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 20G 1½" (Ø 0,9 x 38 mm)</i>	Yellow <i>Giallo</i>	24 months <i>mesi</i>	25 / 200
15565	Sterile needles with safety device 20G 1" (Ø 0,9 x 25 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 20G 1" (Ø 0,9 x 25 mm)</i>	Yellow <i>Giallo</i>	24 months <i>mesi</i>	25 / 200
15521	Sterile needles with safety device 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 21G 1½" (Ø 0,8 x 38 mm)</i>	Green <i>Verde</i>	24 months <i>mesi</i>	25 / 200
15566	Sterile needles with safety device 21G 1" (Ø 0,8 x 25 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 21G 1" (Ø 0,8 x 25 mm)</i>	Green <i>Verde</i>	24 months <i>mesi</i>	25 / 200
15522	Sterile needles with safety device 22G 1½" (Ø 0,7 x 38 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 22G 1½" (Ø 0,7 x 38 mm)</i>	Black <i>Nero</i>	24 months <i>mesi</i>	25 / 200
15567	Sterile needles with safety device 22G 1" (Ø 0,7 x 25 mm) <i>Aghi sterili con dispositivo di sicurezza 22G 1" (Ø 0,7 x 25 mm)</i>	Black <i>Nero</i>	24 months <i>mesi</i>	25 / 200







INSTRUCTIONS FOR USE
ISTRUZIONI PER L'USO

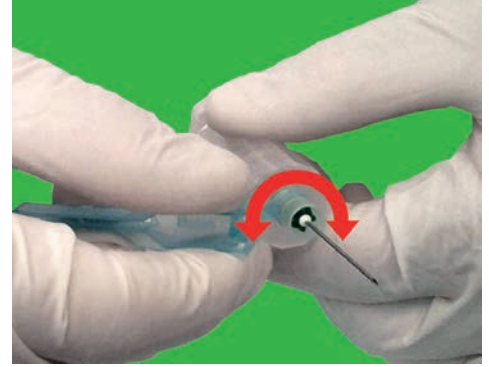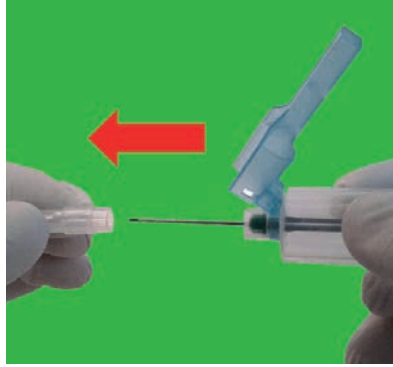

1. Take out the device from the wrapping and rotate the light blue safety needle cover towards the bottom of the holder.
1. Estrarre il dispositivo dalla confezione e ruotare il copriago di sicurezza azzurro verso la base dell'holder.


2. Remove the transparent needle cover.
2. Rimuovere il copriago trasparente.

3. The safety needle cover is positioned so as not to interfere with blood collection and however it can be rotated by taking it near the connection with the holder.
3. Il copriago di sicurezza è posizionato in modo da non ostacolare il prelievo ed è comunque possibile ruotarlo afferrandolo in prossimità del collegamento con l'holder.

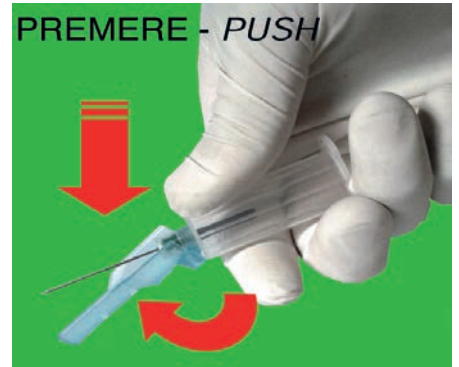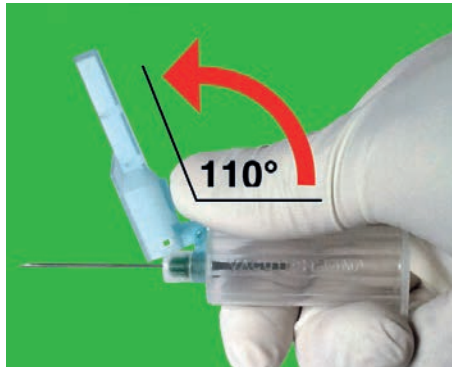

4. Perform blood collection according to safety procedures.
4. Eseguire il prelievo di sangue attenendosi alle procedure di sicurezza.

5. Immediately after the blood collection, use a finger to rotate the safety device to prepare it for closing stage. Continue by pressing the safety device against a hard surface.
5. Terminato il prelievo, ruotare il dispositivo con un dito per predisporlo alla fase di chiusura. Proseguire premendo il dispositivo su una superficie rigida.

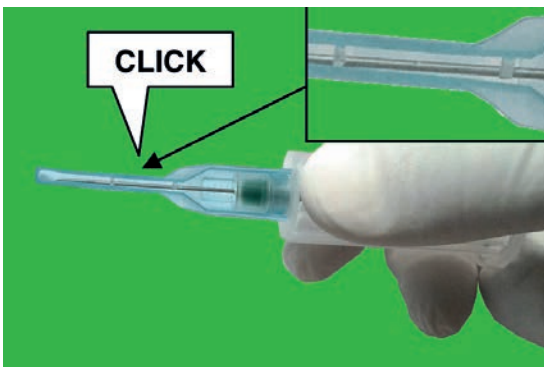

6. Closing operation ends after hearing a click and with the visual check of the locking of the needle. Dispose the device into a sharps container to be incinerated. **DO NOT TRY TO REUSE OR TO TAMPER THE DEVICE AFTER USE.**
6. L'operazione di chiusura si conclude dopo avere udito un click e con il controllo visivo del bloccaggio dell'ago. Gettare il dispositivo in un contenitore per oggetti taglienti da avviare a termodistruzione. **NON TENTARE DI RIUTILIZZARE O MANOMETTERE IL DISPOSITIVO DOPO L'USO.**

REF15520 20GX1½"
REF15565 20GX1"

REF15521 21GX1½"
REF15566 21GX1"

REF15522 22GX1½"
REF15567 22GX1"

AVAILABLE SIZES
FORMATI DISPONIBILI