




STERILE R

CODE codice	SIZE dimensioni	DESCRIPTION descrizione	DRAWING aspirazione	VOLUME volume	COLOUR colore	SHELF-LIFE scadenza	PACKAGING confezione.
14250	9/12,2x118 mm	Sodium citrate 3,8% Sodio citrato 3,8%	1,6 ml	2 ml (1,6 ml+0,4 ml)	Black Nero	18 months mesi	100 / 500

* KIMASED is supplied in aluminium bags which preserve the shelf life for **18 months**. Once the tubes are taken from the bag must be used in 4 months (PAO). If tubes are kept in the bags **closed again** and **sealed** the shelf life is guaranteed for 18 months.

* KIMASED viene fornito in sacchetti d'alluminio per garantire la validità della provetta fino a **18 mesi**. Una volta che le provette vengono prelevate dal sacchetto, devono essere usate entro 4 mesi. Se le provette vengono tenute nei sacchetti **richiusi** e **sigillati** la validità è garantita fino a 18 mesi.

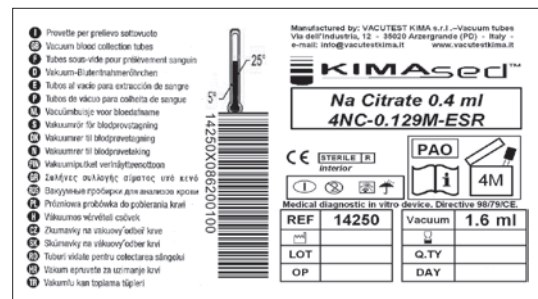

Recommended use
Mixing indications:

- 1 - immediately after blood collection gently invert the sample 8-10 times.
- 2 - before testing mix again manually or mechanically for 3-5 minutes.




Sample preservation: at room temperature (maximum 4 hours).

Storage temperatures	Up to 24 °C	at 2-4 °C
Maximum preservation time	4 hours	≤ 24 hours

Raccomandazioni d'uso
Indicazioni per miscelare:

- 1 - dopo il prelievo agitare il campione 8-10 volte per inversione lenta.
- 2 - prima del test ripetere la miscelazione manualmente o meccanicamente per 3-5 minuti.

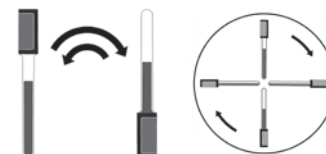

Conservazione del campione: a temperatura ambiente (massimo 4 h).

Temperature di conservazione	Fino a 24°C	a 2-4 °C
Tempo massimo di conservazione	4 ore	≤ 24 ore

For further information related to ESR test see CLSI document (ex NCCLS) H02-A5.

Per ulteriori informazioni relative al test della VES consultare il documento CLSI (ex NCCLS) H02-A5.